

# GEBRUIKSAANWIJZING



steve  
your support




*Dat is pas comfort!*

HÉT EERSTE EN ENIGE HULPMIDDEL VOOR HET AAN-ÉN UITTREKKEN VAN ALLE SOORTEN COMPRESSIEKOUSSEN.


## AANTREKKEN




**1** Plaats Steve voor u op een salontafel en ga achter Steve staan. Positioneer de kous met de hiel naar u toe boven Steve.

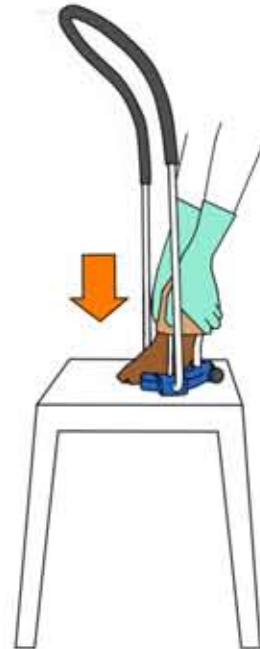

**2** Zoom de kous om het instapstuk van Steve. Stroop de kous op tot het hakstuk van de kous minimaal bovenaan zit.  
*\*let op: Het exacte punt verschilt per gebruiker.*

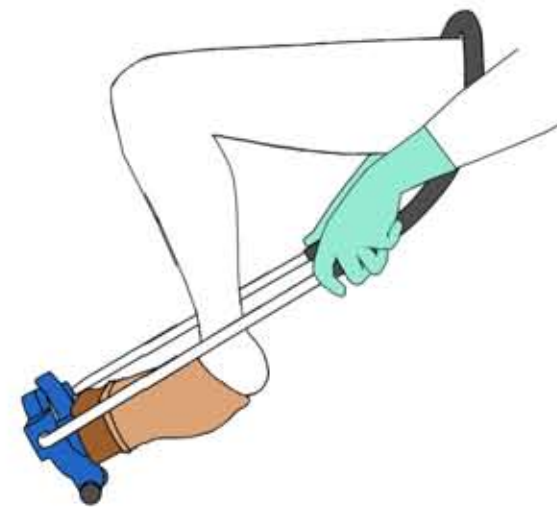

**3** Neem plaats op een stoel. Leg het handvat tegen de knie of in de lies (als u uw voet niet kunt strekken). Steek vervolgens uw voet volledig in de kous.

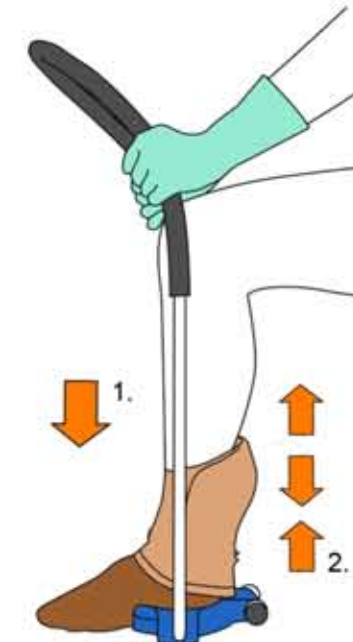

**4** Rol Steve naar u toe zodat deze plat op de grond staat onder uw knie. Duw vervolgens uw voet plat op de grond(1.). Als laatste trekt u Steve rustig omhoog met op en neer gaande bewegingen(2.).  
*\*let op: Rek de kous niet te ver uit.*



**5** Zet Steve terzijde en wrijf de kous op de juiste plek.

## UITTREKKEN



Indien u kousen tot de lies draagt, stroop deze af tot onder de knie.




**1** Schuif de ring met de opening van u af en pijl naar boven gericht, tussen de kous en uw been.




**2** Schuif de ring naar beneden tot onder de kuit. Zorg dat de ring niet scheef zit.



**3** Plaats de onderkant van Steve recht over de ring, zodat de ring recht in Steve klemt. Dit voorkomt mogelijke schade aan de kous.

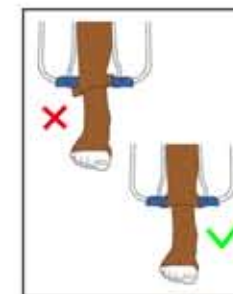

**4** Zodra de wieltjes de grond raken kunt u Steve van u af rijden.

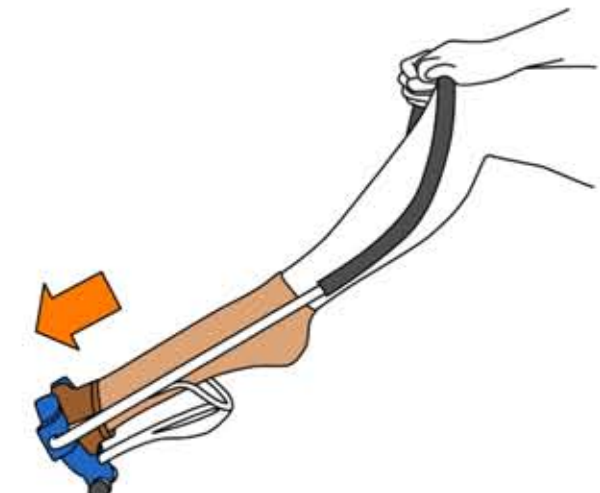

**5** Duw Steve verder van u af en trek uw been uit de kous.



Leverbaar in 2 maten:

Steve® Blue

geschikt voor kuitomvang:

30-38 cm

Steve® Orange

geschikt voor kuitomvang:

38-46 cm

Producent:



[info@westcare.eu](mailto:info@westcare.eu)

Distributeur:



Medeco B.V. Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland | Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland  
Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93 | [info@medeco.nl](mailto:info@medeco.nl) | [www.medeco.nl](http://www.medeco.nl)



[www.steunkousgemak.nl](http://www.steunkousgemak.nl)

patented